

**\_CATÁLOGO DE PRODUTOS**

**VUELO** PHARMA

**NOVAS  
POSSIBILIDADES**



# MEMBRACEL

*Registro ANVISA nº 80074780002*



**\_Membrana**

**Regeneradora**

**Porosa**

## O que é a Membracel?

A **Membracel** é uma membrana de celulose porosa para uso médico, capaz de substituir temporariamente a pele humana e promover a rápida regeneração em lesões causadas por queimaduras, úlceras de membros inferiores ou qualquer outra situação onde ocorra a falta de epiderme ou da derme, em qualquer fase da cicatrização.

## Intervalos de troca


A frequência de troca da membrana irá depender da condição da ferida e do volume de exsudação. Inicialmente, é normal que a necessidade de troca se dê a cada 5 dias. Com o passar do tempo esse intervalo aumentará naturalmente, em decorrência da redução do volume de exsudato secretado pela lesão. A membrana porosa poderá ser mantida até 12 dias, caso não ocorra seu desprendimento ou rompimento, sinais de infecção, dor aguda ou mau cheiro.




# \_FORMA DE APLICAÇÃO




*Limpe a área do ferimento assim como a sua região periférica*

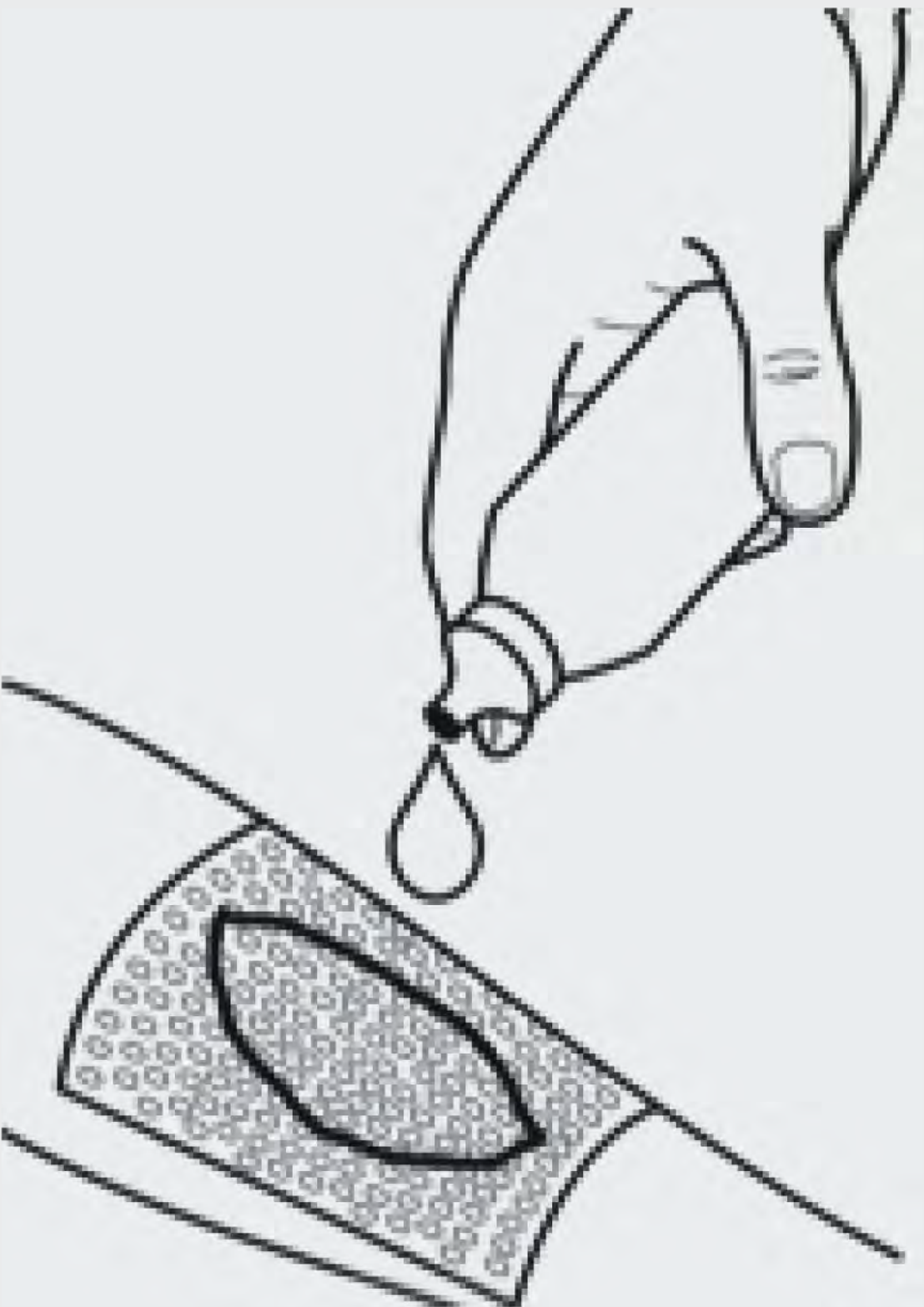

*Coloque a membrana sobre a lesão e umedeça-a totalmente com soro fisiológico.*

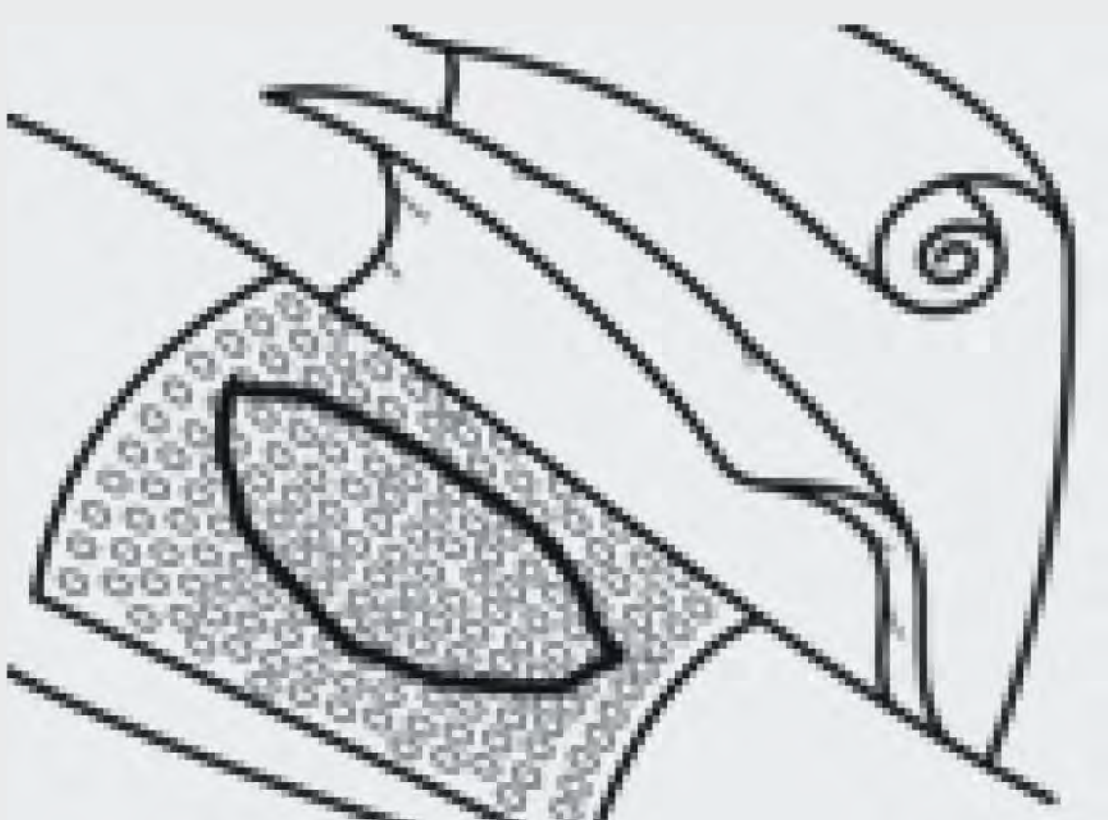

*Acomode uma gaze sobre a membrana e fixe-a utilizando uma faixa ou fita microporosa, fazendo uma leve compressão para ajudar na remoção do exsudato ou secreção.*

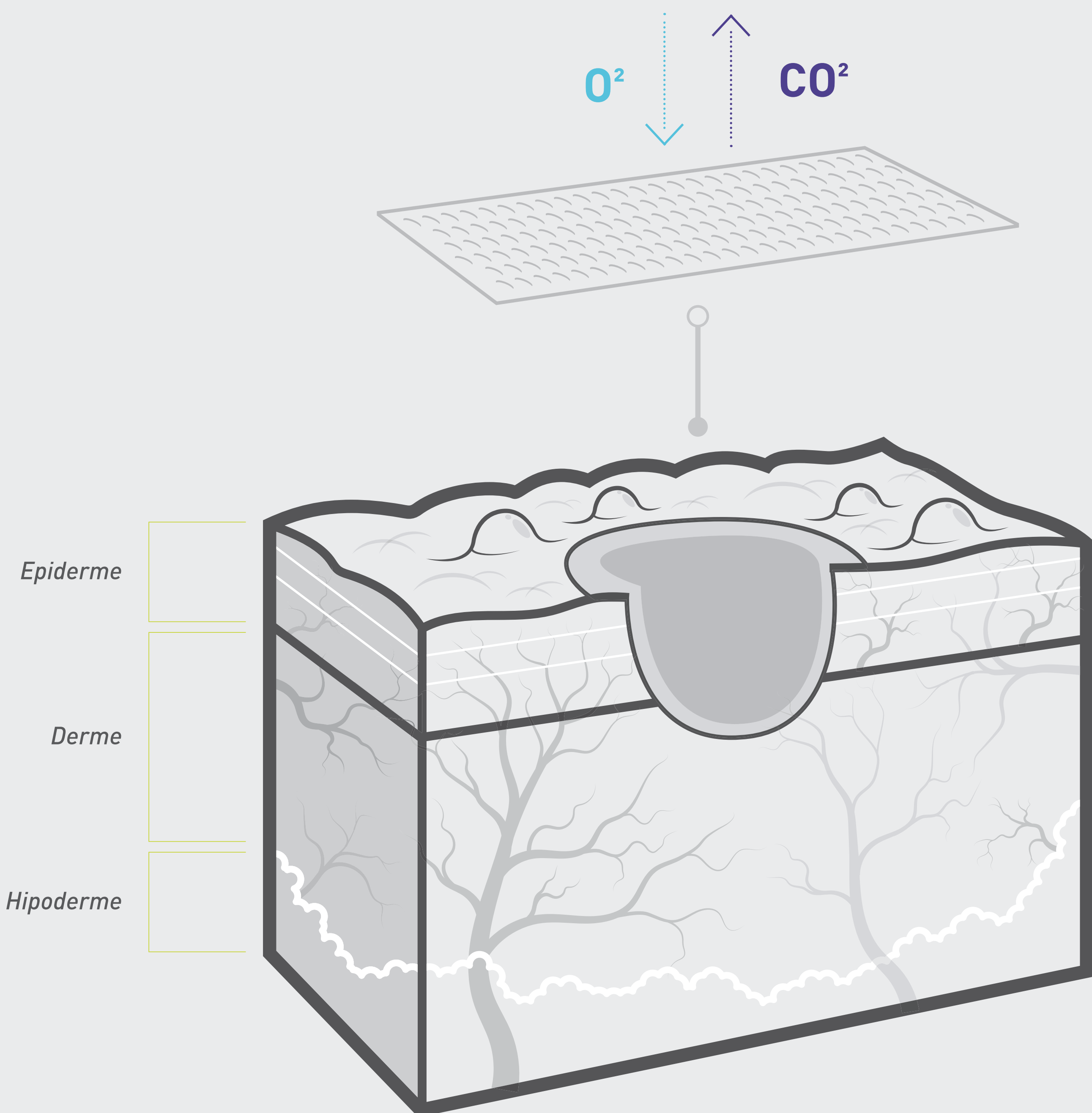

## Cuidados especiais

- Mantenha a membrana em permanente contato com o leito da lesão. A membrana deverá ser trocada quando observado seu desprendimento, rompimento, aumento da dor, sinais de infecção e mau cheiro.
- Nunca use produtos oleosos, pomadas ou cremes à base de óleo sob a Membracel, pois essa prática pode prejudicar a aderência da membrana ao leito da lesão;
- Evite molhar a membrana durante o banho, protegendo o curativo com material impermeável;
- Terapia antimicrobiana sistêmica pode ser prescrita pelo seu médico quando caso haja infecção. Neste caso, a membrana pode ser usada em conjunto com o antibiótico sistêmico;
- Caso seja necessário recortar o curativo Membracel, recomenda-se o uso de tesoura esterilizada;
- O uso da membrana deve ser supervisionado por um profissional da saúde.



# GELIFICADOR PARA BOLSAS DE ESTOMIA

O Gelificador para bolsas de estomia VUELO é constituído de grânulos de polímero acrílico, com grande capacidade de absorção, que permite a gelificação do efluente existente no interior da bolsa, diminuindo o odor, ruídos ou possíveis vazamentos. Quando em contato com líquido apresenta coloração azul a esverdeada, dependendo da concentração da urina e/ou fezes. Possui fragrância agradável de óleo essencial de lavanda.

**\_Grânulos  
para Absorção  
de Líquidos**



*Cadastro ANVISA nº 80074789001*

# SPRAY DE BARREIRA

O Protetor Cutâneo VUELO é uma solução polimérica líquida de secagem rápida, incolor, não gordurosa, resistente à água e sem álcool que forma uma película protetora e uniforme quando aplicado na pele, sem provocar irritações. Dessa forma protege-a por até 72 horas de lesões decorrentes de incontinências urinárias e/ou fecais, sucos digestivos (estomias), fricção e adesivos. Pode ser aplicado na pele saudável, irritada ou lesionada, sem causar ardência ou desconforto. Dermatologicamente testado.



**\_Protetor  
Cutâneo**

**Cadastro ANVISA nº 80074780003**

Queremos estar sempre presentes. Deixar uma marca positiva, respeitar e aceitar cada um do seu jeito, na sua individualidade. Afinal, somos uma empresa feita de pessoas para pessoas. Nós existimos para que você possa ter mais liberdade, autonomia e segurança, para viver mais com menos preocupações. Trazemos conhecimento, novas experiências e, com elas, novas possibilidades.



#### **Responsável Técnico**

Helen de Moraes A. de Souza  
CRF-PR 31612

## BLOG



#### **Vuelo Pharma Ltda.**

Rua Antônio de Paula Braga,  
nº83 - Cachoeira.

CEP 83.506-010

Almirante Tamandaré – PR

CNPJ: 04.159.536/0001-05

SAC: (41) 3657-7611

sac@vuelopharma.com

Indústria Brasileira

**[www.vuelopharma.com](http://www.vuelopharma.com)**