

Ficha de Produto – Spray de Barreira Vuelo Pharma
Protetor Cutâneo



Cadastro ANVISA: 80074780003

Descrição

O Protetor Cutâneo **VUELO**, contendo 28ml, é uma solução polimérica líquida de secagem rápida, incolor, não gordurosa, resistente à água e sem álcool que forma uma película protetora e uniforme quando aplicado na pele, sem provocar irritações. Dessa forma protege-a por até 72 horas de lesões decorrentes de incontinências urinárias e/ou fecais, sucos digestivos (ostomias), fricção e adesivos. O Protetor Cutâneo VUELO pode ser aplicado na pele saudável, irritada ou lesionada, sem causar ardência ou desconforto. **Dermatologicamente testado.**

Composição

Disiloxane, trimetilsiloxisilicato, isododecano, acrilato/politrimetilsiloxi, copolímero de metacrilato, dimeticone/ trimetilsiloxisilicato.

Vantagens e Benefícios

O Protetor Cutâneo **VUELO** não contém álcool e não irrita a pele;
Seca rapidamente;
Protege a pele de efluentes corpóreos, umidade ou qualquer substância que pode ser irritante;
Não contém aromatizantes ou conservantes;
Não é citotóxico;
É hipoalergênico;
É de longa duração. Não é necessária a remoção para uma nova aplicação.

Indicações

Proteção da pele ao redor de ostomias, fístulas e feridas drenantes; lesões de pele decorrentes de incontinências urinárias e/ou fecais, sucos digestivos (ostomias), fricção; processos alérgicos a adesivos (fitas); peri-estomas; ao redor de cânulas de entubação, traqueostomias, gastrostomias; dermatite e

irritação de pele; cisalhamento e agressões de adesivos devido trocas constantes de curativos e/ou bolsas.

Contraindicação

O Protetor Cutâneo VUELO não deve ser usado sob a pele infectada ou feridas exsudativas.

Instruções de uso

A pele deve estar limpa e seca antes da aplicação do Protetor Cutâneo VUELO. Mantenha o aplicador a uma distância de 10 a 15 cm da pele e pulverize uma camada lisa e uniforme de película na região que requer proteção. Deixe secar completamente. Se uma segunda camada for necessária, deixe a primeira secar antes de aplicar a segunda. É indicada a aplicação do Protetor Cutâneo VUELO a cada 72 horas. Não é necessário remover a película existente antes da reaplicação.

Nos casos de incontinência urinária e/ou fecal ou casos em que houver a necessidade de limpezas frequentes, a reaplicação é indicada a cada 24 horas ou quando se fizer necessário. Para proteção sob adesivos, reaplique a cada troca de fitas adesivas ou curativos. Caso deseje, a película poderá ser removida com um solvente de adesivos de uso hospitalar, de acordo com as instruções de uso do solvente, evitando a fricção da pele para evitar lesões.

Precauções

Suspender o uso caso ocorra eritema ou qualquer outro sinal de irritação e, caso os sintomas persistam, consulte seu médico. O uso concomitante de outros produtos de proteção como cremes, loções e pomadas pode diminuir a eficácia do Protetor Cutâneo VUELO.

Advertência

O Protetor Cutâneo VUELO é inflamável, por isso seu uso é indicado em áreas ventiladas, longe de chamas, faíscas e outras fontes de ignição. **Manter fora do alcance de crianças. Cuidado! Altamente inflamável. Não fume.**

Armazenagem

Manter a temperatura entre 15 e 40°C em local seco e limpo. Manter longe do calor, chamas e outras fontes de ignição.

Código de barras número: 7898936988782

NCM: 3906.90.29